

MESURE DU TAUX DE GLYCÉMIE



MESSAGES D'ERREUR



L'icône **HI** apparaît sur l'écran.

Le résultat de votre test de glycémie est supérieur à 600 mg/dL.



Bandelette enlevée durant le compte à rebours.

Répéter le test avec une nouvelle bandelette réactive.



L'icône **LO** apparaît sur l'écran.

Le résultat de votre test de glycémie est inférieur à 20 mg/dL.



Déconnexion NFC durant la transmission.

Recommencer la transmission NFC sans l'interrompre.



Erreur système (hardware).

Enlever et réinsérer les piles pour redémarrer le lecteur, et répéter le test avec une nouvelle bandelette.



Pile faible.

Changer la pile conformément aux instructions.



La bandelette réactive est endommagée, a déjà été utilisée ou l'échantillon de sang est appliqué trop tôt.

Enlever l'ancienne bandelette réactive et répéter le test avec une nouvelle. Attendre que l'icône «goutte» commence à clignoter.



La température ne se trouve pas dans la fourchette conseillée.

Répéter la mesure après au moins 30 minutes, lorsque la température de fonctionnement sera atteinte.



Erreur de remplissage.

Répéter le test avec une nouvelle bandelette réactive et effectuer un prélèvement correct.

GRATIS infonummer **0800 99 009**
Numéro info **GRATUIT**

