

Mesure du taux de **GLYCÉMIE** (GLU) et des corps **CÉTONIQUES** (KET)



Glucomen
areo **GK**



www.glucomenday.be



INTERPRÉTATION des messages affichés



Interprétation des résultats de β -cétones dans le sang

< 0.6

En dessous de 0.6 mmol/L - normal: recontrôler votre niveau de β -cétones après 1-2 heures si votre glycémie reste au-dessus de 250 mg/dL.

0.6 - 1.5


0.6-1.5 mmol/L - indique un besoin supplémentaire en insuline.

> 1.5

Plus de 1.5 mmol/L - indique un risque d'acidocétose diabétique. Appeler immédiatement votre équipe médicale.

Mesure des β -cétones uniquement à l'aide des bandelettes spécifiques "Ket".

Messages HI (haut) et LO (bas)

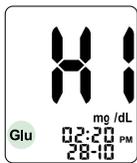


Si le résultat du test de glycémie est supérieur à 600 mg/dL, l'icône HI apparaît à l'écran.




Si le résultat du test de glycémie est inférieur à 20 mg/dL, l'icône LO apparaît à l'écran.



Si le résultat du test de β -cétones est supérieur à 8 mmol/L, l'icône HI clignote à l'écran.

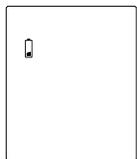

Piles faibles.
Changez les piles en suivant les instructions.

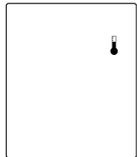

La température n'était pas dans les limites recommandées. Répétez la mesure après un intervalle d'au moins 30 minutes, quand la température de fonctionnement a été rétablie.

Messages d'erreur



Erreur matériel de système.
Retirez et remplacez les piles pour relancer le lecteur et répétez le test avec une bandelette neuve. Si le problème persiste, contactez le Service Clientèle de A. Menarini Diagnostics.



La bandelette est endommagée ou a déjà été utilisée ou l'échantillon de sang a été appliqué avant que l'icône de la goutte de sang ait commencé à clignoter à l'écran. Retirez la bandelette réactive et répétez le test avec une bandelette neuve. Attendez jusqu'à ce que l'icône de la goutte de sang commence à clignoter avant de recommencer.



Erreur dans l'échantillon de sang. L'échantillon de sang n'a pas rempli la zone prévue pour l'échantillon de la bandelette pendant la mesure car l'échantillon n'a pas été appliqué correctement ou le volume était insuffisant. Répétez le test avec une bandelette neuve après avoir fait un prélèvement correct de votre doigt.



La bandelette a été retirée ou bougée pendant le compte à rebours.
Répétez le test avec une bandelette neuve.

NUMÉRO INFO GRATUIT
0800 99 009